

# 94379 Kompress 30x30 cm

## Steril Brännskadekompress 30x30cm

Instruktionsfolder med 26 språk på produkten.

SE/GB/NO/DK/FI/DE/FR/IT/NL/IS/TR/GR/PT/ES/CZ/PL/EE/LV/LT/RU/SK/SL/UA/AR/HU/KO

- For Burns Brännskadekompress är en produkt som ger snabb avkylning och lindring när det kommer till brännskador, solsveda och skrubbsår
- Gelen bromsar effekterna av en brännskada genom att snabbt svalka skadestället och transportera bort värmen genom konvektion. Risken för blåsbildning minskar väsentligt
- Produkterna är enkla att använda och fungerar bra vid transport för fortsatt vård
- Produkterna passar särskilt bra där du inte har tillgång till vatten



### Bruksanvisning:

Öppna förpackningen och ta ur kompressen. Lägg på kompressen på skadan och håll över resterande gel från påsen. Fixera gärna löst med t ex självhäftande gasbinda. Bäst effekt uppnås under de första 3 timmarna.

### Varning:

- Att täcka en stor kroppsytta kan orsaka hypotermi.
- För engångsbruk - Återanvändning kan orsaka infektion.
- Använd inte om förpackningen är skadad eller om förbandet verkar uttorkat.

**Kemiska brännskador:** Vid kemiska brännskador måste såret sköljas noggrant och neutraliseras innan gelen används.

### Innehåll:

Skumkompress - 100% Polypropylene Medical Grade Foam  
320g gel - Purified water, Melaleuca Oil (<1%), Emulsifiers and preservatives



TILLVERKARE	VARUMÄRKE	KATEGORI	URSPRUNGLAND	VARUKOD	REGULATION CONFORMITY	
AKLA	AKLA	BRÄNNSKADEPRODUKTER	SVERIGE	30059099	93/42/EEC	
HÅLLBARHETSTID	MEDICAL DEVICE	KVALITETSCERTIFIKAT	MILJÖCERTIFIKAT			
5 år från tillverkningsdatum	Class IIb Rule 4 Sterile	ISO 13485	ISO 14001			
NSN	NIIN	GMDN	CPV CODES	UNCCS CODES		
			33141119-7			
ECLASS	UNSPSC					
34210000	42311513					
LOGISTIK	ANTAL	MÅTT	VIKT	EAN / GS1		
KFP	1 st	200x250x10MM	0,326 KG	7311410943799		
KFP / DFP						
KFP / TRP	50 st	590x390x220mm	17,18 KG	7311410243790		
KFP / Pall	1200 st	1200x800x1470mm	437,32 KG			

